


Wir wissen, was läuft!

Orthopädieschuhtechnik | Einlagen, Bandagen / Orthesen
Kompressionsstrümpfe | Beratungszentrum Lymphologie

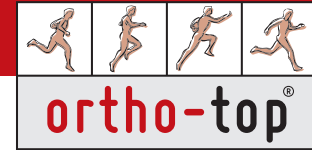

Wir wissen, was läuft!

- Passform ✓
- Funktion ✓
- Entlastungselemente ✓
- Oberbezug ✓

Nutzen Sie unseren Service und trainieren Sie weiterhin lange und beschwerdefrei. Lassen Sie Ihre Einlagen regelmäßig kostenlos bei uns kontrollieren, so nutzen Sie die Wirkung der Einlage immer optimal und es kann sich eine schnelle Verbesserung einstellen. Ähnlich wie bei Ihren Sportschuhen ergeben sich nach vielen gelaufenen Kilometern auch an Ihren (Sport-) Einlagen Materialveränderungen. Auch wenn die Einlagen zerschlissen sind, ist die Passgenauigkeit nicht mehr perfekt.

Melden Sie sich bitte bei uns, damit wir Ihre Einlagen weiter optimieren können:

- bei Kindern spätestens nach 3 Monaten
- oder wenn der Fuß gewachsen ist
- bei Erwachsenen nach 12 Monaten
- bei neurologischen Krankheitsbildern wie z.B. Diabetes, oder Polyneuropathie nach 6 Monaten, je nach Schweregrad der Erkrankung auch in kürzeren Abständen

Ihr Termin bei uns:

Kontrolle durch: Namenskürzel | Datum

Datum	Uhrzeit
Datum	Uhrzeit
Datum	Uhrzeit

Öffnungszeiten:

Montag: 08:30 – 18:00 Uhr
Dienstag: 08:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 08:30 – 15:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 – 18:00 Uhr
Freitag: 08:30 – 18:00 Uhr

ortho-top GmbH & CO KG
Merkatorstraße 2 | 41515 Grevenbroich
Tel.: 0 21 81. 756 93-0 | Fax: 0 21 81. 756 93-22
info@ortho-top.de

Alles Wissenswerte über: Einlagen & Fußversorgung



TOP
ORTHOPÄDIE-
SCHUHTECHNIKER

2019

FOCUS

DEUTSCHLANDS
EINRICHTUNGEN
IM VERGLEICH

FOCUS-DIABETES
02 | 2019

Informationen zum Tragen Ihrer Einlagen

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben heute einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan.



Die Schuhe dürfen nicht zu klein sein und müssen genügend Volumen bieten. (Längenzugabe ca. 1 cm)



Eine gute Passform der Schuhe ist Voraussetzung für die erfolgreiche Versorgung.



Achten Sie auf guten Fersensitz, z.B. durch Schnürung oder Klettverschluss.



Tragen Sie Ihre Einlagen in dafür geeignetem Schuhwerk – entfernen Sie bitte eventuell innenliegende Sohlen.



Schuhe und Einlagen müssen aufeinander abgestimmt sein.

Ihre neue Einlagen-Fußversorgung, bzw. Sport-Einlagen wurden speziell für Sie hergestellt - ein individuelles Maßprodukt.



Prüfen Sie Ihre Einlagen vor jedem Tragen auf einwandfreien Zustand.



Achten Sie beim Einlegen in den Schuh auf die richtige Seitenzuordnung (links/rechts) und tragen Sie die Einlagen stets mit Strümpfen, möglichst auch zu Hause.



Wir kontrollieren für Sie kostenlos, ob die Einlagen auch in Ihre anderen Schuhe passen.



Püfen Sie Ihre Füße auf Rötungen und Druckstellen. Treten diese auf, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.



Tragen Sie Ihre Einlagen in den ersten Tagen nur stundenweise. (Gewöhnungszeit ca. eine Woche)

Pflege

- ! Lederbezogene- oder Sport-Einlagen sind nach Gebrauch zum Lüften aus den Schuhen zu nehmen und schonend zu trocknen.
- ! Die Einlagen dürfen nicht über 50° C erhitzt werden, bitte NIEMALS zum Trocknen auf einen Ofen, auf die Heizung oder auf andere Wärmequellen legen.
- ! Kunststoff- und Microfaserbezüge können mit einem feuchten Tuch unter Zugabe eines leichten Desinfektionsmittels oder Seifenlauge abgerieben werden.
- ! Bei starker Verschmutzung können Sie Ihre Einlagen auch in der Waschmaschine bei 30° C waschen.
Wichtig: kein Weichspüler, nicht in den Trockner!

Gesundheit

- ! Da nur geprüfte Materialien zum Einsatz kommen, sind allergische Reaktionen selten. Falls sie dennoch auftreten, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung.

Wichtig

- ! Führen Sie an Ihren Einlagen auf keinen Fall eigenständige Änderungen oder Reparaturen durch.

Unsere individuellen Einlageversorgungen ...

