



Wir wissen, was läuft!



Wir wissen, was läuft!

- Passform ✓
- Funktion ✓
- Entlastungselemente ✓
- Oberbezug ✓

Nutzen Sie unseren Service und trainieren Sie weiterhin lange und beschwerdefrei. Lassen Sie Ihre Einlagen regelmäßig kostenlos bei uns kontrollieren, so nutzen Sie die Wirkung der Einlage immer optimal und es kann sich eine schnelle Verbesserung einstellen. Ähnlich wie bei Ihren Sportschuhen ergeben sich nach vielen gelaufenen Kilometern auch an Ihren (Sport-) Einlagen Materialveränderungen. Auch wenn die Einlagen zerschlissen sind, ist die Passgenauigkeit nicht mehr perfekt.

### Melden Sie sich bitte bei uns, damit wir Ihre Einlagen weiter optimieren können:

- bei Kindern spätestens nach 3 Monaten
- oder wenn der Fuß gewachsen ist
- bei Erwachsenen nach 12 Monaten
- bei neurologischen Krankheitsbildern wie z.B. Diabetes, oder Polyneuropathie nach 6 Monaten, je nach Schweregrad der Erkrankung auch in kürzeren Abständen

#### Ihr Termin bei uns:

Kontrolle durch: Namenskürzel | Datum

Datum	Uhrzeit
Datum	Uhrzeit
Datum	Uhrzeit

Orthopädieschuhtechnik | Einlagen, Bandagen / Orthesen  
Kompressionsstrümpfe | Beratungszentrum Lymphologie

#### Öffnungszeiten:

Montag: 08:30 – 18:00 Uhr  
Dienstag: 08:30 – 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:30 – 15:00 Uhr  
Donnerstag: 08:30 – 18:00 Uhr  
Freitag: 08:30 – 18:00 Uhr

**ortho-top GmbH & CO KG**  
Am Hammerwerk 14 | 41515 Grevenbroich  
Tel.: 0 21 81. 756 93-0 | Fax: 0 21 81. 756 93-22  
info@ortho-top.de

## Alles Wissenswerte über: Einlagen & Fußversorgung



**TOP**

ORTHOPÄDIE-  
SCHUHTECHNIKER

2019

**FOCUS**

DEUTSCHLANDS  
EINRICHTUNGEN  
IM VERGLEICH

FOCUS-DIABETES  
02 | 2019

# Informationen zum Tragen Ihrer Einlagen

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben heute einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan.



Die Schuhe dürfen nicht zu klein sein und müssen genügend Volumen bieten. (Längenzugabe ca. 1 cm)



Eine gute Passform der Schuhe ist Voraussetzung für die erfolgreiche Versorgung.



Achten Sie auf guten Fersensitz, z.B. durch Schnürung oder Klettverschluss.



Tragen Sie Ihre Einlagen in dafür geeignetem Schuhwerk – entfernen Sie bitte eventuell innenliegende Sohlen.



Schuhe und Einlagen müssen aufeinander abgestimmt sein.

Ihre neue Einlagen-Fußversorgung, bzw. Sport-Einlagen wurden speziell für Sie hergestellt - ein individuelles Maßprodukt.



Prüfen Sie Ihre Einlagen vor jedem Tragen auf einwandfreien Zustand.



Achten Sie beim Einlegen in den Schuh auf die richtige Seitenzuordnung (links/rechts) und tragen Sie die Einlagen stets mit Strümpfen, möglichst auch zu Hause.



Wir kontrollieren für Sie kostenlos, ob die Einlagen auch in Ihre anderen Schuhe passen.



Püfen Sie Ihre Füße auf Rötungen und Druckstellen. Treten diese auf, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.



Tragen Sie Ihre Einlagen in den ersten Tagen nur stundenweise. (Gewöhnungszeit ca. eine Woche)

## Pflege

- ! Lederbezogene- oder Sport-Einlagen sind nach Gebrauch zum Lüften aus den Schuhen zu nehmen und schonend zu trocknen.
- ! Die Einlagen dürfen nicht über 50° C erhitzt werden, bitte NIEMALS zum Trocknen auf einen Ofen, auf die Heizung oder auf andere Wärmequellen legen.
- ! Kunststoff- und Microfaserbezüge können mit einem feuchten Tuch unter Zugabe eines leichten Desinfektionsmittels oder Seifenlauge abgerieben werden.
- ! Bei starker Verschmutzung können Sie Ihre Einlagen auch in der Waschmaschine bei 30° C waschen.  
**Wichtig: kein Weichspüler, nicht in den Trockner!**

## Gesundheit

- ! Da nur geprüfte Materialien zum Einsatz kommen, sind allergische Reaktionen selten. Falls sie dennoch auftreten, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung.

## Wichtig

- ! Führen Sie an Ihren Einlagen auf keinen Fall eigenständige Änderungen oder Reparaturen durch.

## Unsere individuellen Einlageversorgungen ...

